

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신25-782호
- 품목명: 환자고정보조대

작성연월 : 2025년 04월 18일

■ 사용목적

환자 진료 또는 주사 시에 환자의 자세를 유지 또는 고정하기 위해 사용되는 기구·기계. 천으로 만든 재료는 제외된다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하여 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 제품의 포장에 손상이 발생했는지 확인한다.
- (2) 제품의 오염 또는 손상을 확인한다.

2) 조작방법

- (1) Head Immobilizer를 들것에 단단히 고정 시킨다.
- (2) 척추 손상이 의심되는 환자를 들것에 눕힌다.
- (3) 되도록 환자에게 변위를 가하지 않고 Head Immobilizer를 환자의 머리에 맞게 끼운다.
- (4) 헤드 블록에 환자의 머리가 반듯이 고정 되어 있는지 재확인 한다.
- (5) 머리 끈과 턱 끈을 조여 단단히 고정시킨다

3) 사용 후 보관 및 관리방법

(1) 세척방법

- ① 물과 세제를 사용하여 세척할 수 있으며, 표면 소재를 손상시킬 수 있는 과도한 기계적 세척은 피해야 한다.
- ② 소독은 반드시 알코올 기반(에탄올/프로판올) 소독제만 사용해야 한다.
- ③ 세척 후에는 제품을 충분히 건조시킨다.

(2) 보관방법

직사광선을 피하여 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 최대한 환자의 움직임이 없도록 주의한다.
- 3) 목 부분이 바르지 않은 환자의 경우 상태 그대로 고정하도록 한다.
- 4) 직사광선, 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)