

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신25-796호
- 품목명: 수동식환자운반기

작성연월 : 2025년 04월 22일

■ 사용목적

환자를 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하여 실온에 보관


■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 사용 전 사용방법을 숙지한다.
- (2) 사용 전 본체의 바퀴, 슬라이딩 트랙등 작동여부, 파손된 부분은 없는지 확인한다.

2) 조작방법

- (1) 거치대에서 제품을 고정하고 있는 고정장치를 풀어 제품을 떼어낸다.(접힌상태)
- (2) 접힌 상태에서 환자가 있는 곳까지 이동하여 제품을 펼친다.
- (3) 제품 잠금장치를 풀고 제품을 의자형태로 펼친다.
- (4) 환자를 제품에 앉히고 발받침대를 펴서 환자의발을 올려놓는다.
- (5) 필요시 머리고정대를 이용하여 머리를 고정시킨다.
- (6) 계단을 내려갈때는 슬라이딩 트랙을 잡아당겨 펼친다.
- (7) 슬라이딩 트랙을 계단 3개의 끝에 걸치게 누르면서 조심하 밀면서 내려간다.(그림참조)

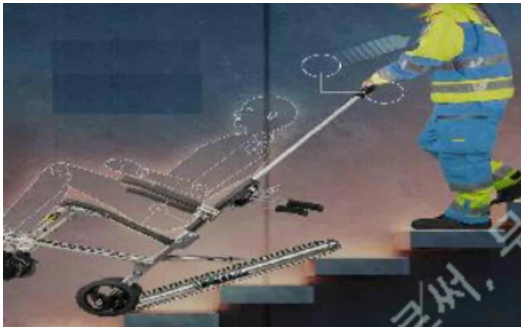

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 제품의 표면에 세척제나 살균제를 뿌려 부드러운 솔로 문질러 오염물질을 세척한다.
- (2) 슬라이딩 트랙 및 의자, 발받침대를 접어 잠금장치로 잠근다.
- (3) 거치대에 결합하여 고정장치를 이용해 거치한다.
- (4) 거치대 잘 고정되어 있는지 재확인한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 제품이 파손된 부분이 있는지 확인한다.
- 2) 본 제품을 본래의 사용목적 이외의 다른 용도로 사용하면 안된다.
- 3) 사용 전에는 반드시 세척한 이후에 사용한다.

- 4) 올바른 사용을 위해 교육을 받은 전문가가 사용하여야 한다.
- 5) 제품의 최대 허용중량(230kg)을 초과하지 않는다.
- 6) 제품을 펴고 접을때는 "딸깍" 소리가 날때까지 완전히 펴고접는다.
- 7) 안전을 위해서 2인 1조 이상의 인원으로 사용한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)