

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신25-853호
- 품목명: 수동식환자운반기

작성연월 : 2025년 04월 29일

■ 사용목적

환자를 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하여 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 준비사항

- (1) 사용하기 전 제품 손상여부를 면밀하게 확인한다.
- (2) 밸브가 정상적으로 작동하는지 확인한다.

2) 조작방법


- (1) 환자를 베이스 플레이트에 고정한다.

- ① 버클을 열고 스트랩을 양쪽에 위치시킨다.
- ② 환자를 베이스 플레이트 위에 올려 놓는다.
- ③ 3점식 안전 버클을 잠그고 스트랩을 조인다.



- (2) 구성품 진공 매트리스를 함께 사용하여 고정할 경우, 아래와 같이 환자를 고정한다.

- ① 버클을 열고 진공 매트리스를 베이스 플레이트 위에 놓는다. 매트리스의 개구부를 통해 사타구니 부분을 통과시키고, 어깨 스트랩은 틈을 통해 끼운다.
- ② 환자를 매트리스 위에 올리고, 버클을 닫는다.
- ③ 진공 매트리스를 환자 주변에 부드럽게 밀착시킨 후 매트리스가 환자를 제대로 지지할 때까지 공기를 제거한다.

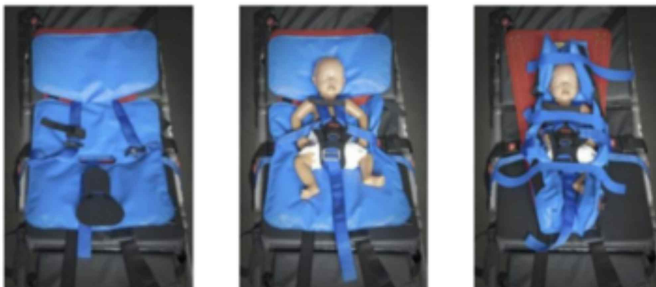

- (3) 환자를 고정한 플레이트 스트랩을 들것의 프레임 머리쪽과 발쪽, 그리고 측면의 적절한 위치에 연결한 후, 안전 버클을 잠그고 스트랩을 조인다.



3) 사용 후 보관 및 관리방법

(1) 세척방법

- ① 물과 세제를 사용하여 세척할 수 있으며, 표면 소재를 손상시킬 수 있는 과도한 기계적 세척은 피해야한다.
- ② 소독은 반드시 알코올 기반(에탄올/프로판올) 소독제만 사용해야 한다.
- ③ 세척 후에는 제품을 충분히 건조시킨다.

(2) 보관방법

직사광선을 피하여 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 장비를 부적절하게 사용할 경우, 환자에게 부상이나 손상을 초래할 수 있다.
- 3) 세척 및 소독은 매 사용 후 반드시 수행해야 한다

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)