

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신25-1298호
- 품목명: 수동식환자운반기

작성연월 : 2025년 06월 20일

■ 사용목적

환자를 이송하는 데에 사용하는 수동식 기구

■ 보관 또는 저장방법

습하거나 햇빛이 강하지 않은 곳에 보관

■ 사용방법

가. 사용 전 주의사항

- 1) 사용 전 사용방법을 숙지한다.
- 2) 사용 전 본체 및 벨트, 손잡이 등 파손된 부분은 없는지 확인한다.

나. 조작방법

- 1) 가능하다면, 환자가 들것에 올려지는 데 적극적으로 참여하도록 장려합니다.
- 2) 이송할 환자를 눕힌 후 고정벨트로 조여 환자를 고정 시킨다.
- 3) 환자를 이송할 구조자는 양쪽으로 한명씩 손잡이를 잡고 환자를 이송시킨다.
- 4) 상황이 여의치 않을시 더 많은 구조자가 필요합니다.
- 5) 균형을 유지하기 위해서 들것이 수평을 유지하는 것이 중요합니다.
- 6) 들것을 땅에서 밀지 않으며 환자를 이송한다.
 - (1) 필요시 걸쇠를 이용해 리프팅을 하여 들것을 들어 올릴수 있다.
 - (2) 이때 들것의 회전을 제어할 수 있도록 구조자의 위치를 배치합니다,

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 제품의 표면에 세척제나 살균제를 뿌려 부드러운 솔로 문질러 세척한다.
- 2) 제품은 습하거나 햇빛이 강해진 않은 곳에 보관한다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 제품이 파손된 부분이 있는지 확인한다.
- 2) 본 제품을 본래의 사용목적 이외의 다른 용도로 사용하면 안된다.
- 3) 들것을 땅에서 밀지 않는다.
- 4) 올바른 사용을 위해 교육을 받은 전문가가 사용하여야 한다.
- 5) 장치에 무거운 물건을 보관하지 않는다.
- 6) 허용 중량을 초과하는 않는다.
- 7) Royax 승인 약세사리만을 사용한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)