

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신25-1320호
- 품목명: 환자고정보조대

작성연월 : 2025년 06월 24일

## ■ 사용목적

환자 진료 또는 주사 시에 환자의 자세를 유지 또는 고정하기 위해 사용되는 기구·기계. 천으로 만든 재료는 제외된다.

## ■ 보관 또는 저장방법

습하거나 직사광선을 피하여 보관

## ■ 사용방법

### 가. 사용 전 주의사항

- 1) 사용 전 사용방법을 숙지한다.
- 2) 사용 전 벨트, 지지대 등 파손된 부분은 없는지 확인한다.

### 나. 조작방법

- 1) 고정대를 들것에 고정 시킨다.
- 2) 이송할 환자를 들것에 눕힌 후 환자를 고정 시킨다.
- 3) 되도록 환자에게 변위를 가하지 않고 지지대를 환자의 머리에 맞게 끼운다.
- 4) 헤드블록에 환자의 머리가 반듯이 고정되어 있는지 재확인한다.
- 5) 머리끈과 턱끈을 조여 단단히 고정시킨다.

### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

#### 1) 세척방법

- (1) 물과 세제를 사용하여 세척할 수 있으며, 표면 소재를 손상시킬 수 있는 과도한 기계적 세척은 피해야 한다.
- (2) 소독은 반드시 알코올 기반(에탄올/프로판올) 소독제만 사용해야 한다.
- (3) 세척 후에는 제품을 충분히 건조시킨다.

#### 2) 보관방법

습하거나 직사광선을 피하여 보관한다.

## ■ 사용시 주의사항

- 1) 사용전 제품이 파손된 부분이 있는지 확인한다.
- 2) 본 제품을 본래의 사용목적 이외의 다른 용도로 사용하면 안된다.
- 3) 최대한 환자의 움직임이 없도록 주의한다.
- 4) 올바른 사용을 위해 교육을 받은 전문가가 사용하여야 한다.

## ■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)