

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신25-2174호
- 품목명: 검안경

작성연월 : 2025년 10월 10일

■ 사용목적

눈의 망막, 각막, 방수, 수정체, 초자체 등을 검사하는 기구

■ 보관 또는 저장방법

가. 작동 조건 : 온도: 10°C ~ 35°C, 습도: 30% ~ 90%

나. 보관 조건 : 온도: -10°C ~ 55°C, 습도: 10% ~ 95%(without condensation)

다. 운송 조건 : 온도: -40°C ~ 70°C, 습도: 10% ~ 95%(without condensation)


■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 본 제품을 사용하기 전에 손상여부와 세척 등을 면밀하게 확인한다.
- 2) 본 제품은 자격을 갖춘 의료 전문가만 사용해야 한다.

나. 조작방법

- 1) 검안경 헤드(Head)를 핸들에 장착하고 전원을 켜다
- 2) 렌즈휠(a)을 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌려 원하는 렌즈를 선택한다.
- 3) 선택된 렌즈의 배율은 창(b)을 통해 확인할 수 있다.
- 4) 본 제품은 5가지의 다른 조리개(aperture) 세트가 장착되어 있으며, 조리개휠(c)을 돌려 선택할 수 있다.
- 5) 램프 교체 시에는 헤드를 핸들에서 분리한 후 램프(d)를 아래로 당겨 분리한다. 새 램프의 유리 표면을 닦은 후 위치 고정 핀(e)이 슬롯에 맞도록 삽입한다.

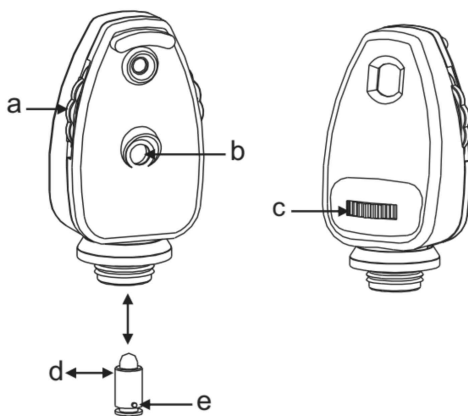

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

1) 세척방법

(1) 렌즈세척

렌즈는 먼지 제거용 공기 분사기(dry compressed air duster)로 세척할 수 있다. 연마제, 알코올 또는 화학약품은 사용하지 않는다.

(2) 헤드(Head) 세척

외부는 부드러운 천으로 닦는다. 어떤 종류의 액체에도 기기를 담그지 않는다.

(3) 핸들 세척

젖은 천으로 닦거나 소량의 알코올을 사용한다.

2) 보관방법

(1) 기기를 장기간 염분 또는 고습환경에 방치하지 않는다.

(2) 청결한 환경에서 보관하고, 상온에서 보관한다.

(3) 작동조건

온도: 10°C ~ 35°C, 습도: 30% ~ 90%

(4) 보관조건

온도: -10°C ~ 55°C, 습도: 10% ~ 95%(without condensation)

(5) 운송조건

온도: -40°C ~ 70°C, 습도: 10% ~ 95%(without condensation)

■ 사용시주의사항

가. 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 렌즈 표면을 마모 및 흠집으로부터 보호한다.
- 3) 렌즈 표면에 직접 손을 대지 않는다.

나. 경고

- 1) 본 제품을 물에 담그지 않는다.
- 2) 연마제 또는 기타 화학약품을 사용하지 않는다.
- 3) 손상된 상태에서는 사용하지 않는다.
- 4) 증기멸균(Autoclaving) 시도는 심각한 전기적 손상을 초래할 수 있다.
- 5) 초음파 세척은 권장하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)