

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신25-2360호
- 품목명: 경성귀내시경

작성연월 : 2025년 11월 06일

■ 사용목적

이과영역, 주로 중이 내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

■ 보관 또는 저장방법

가. 작동 조건 : 온도: 10°C ~ 40°C, 습도: 30% ~ 75%

나. 보관 및 운송 조건 : 온도: -20°C ~ 60°C, 습도: 10% ~ 90%(without condensation)


■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 본 제품을 사용하기 전에 손상여부와 세척 등을 면밀하게 확인한다.
- 2) 본 제품은 자격을 갖춘 의료 전문가만 사용해야 한다.

나. 조작방법

- 1) 팁을 기구에 밀어 넣어 내부 돌기가 틈에 맞물리도록 한다(a). 시계 방향으로 돌려 고정한다.
- 2) 렌즈(b)는 3배 확대 기능이 있으며, 기구 사용 시 옆으로 젖힐 수 있다.
- 3) 공기주입기를 포트(c)에 연결할 수 있다.
- 4) 램프 교체 시에는 핸들에서 헤드를 분리한 다음 램프(d)를 아래로 당겨 제거한 후 새 램프를 밀어 넣어 장착한다.

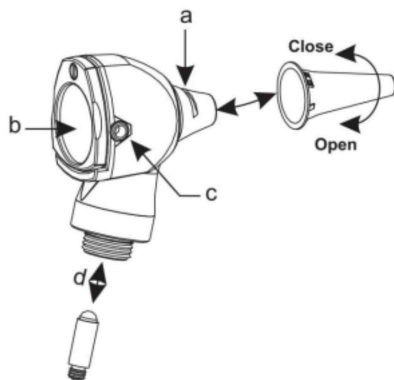

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

1) 세척방법

(1) 렌즈세척

렌즈는 미온수와 비누로 세척할 수 있다. 연마제, 알코올 또는 화학약품은 사용하지 않는다. 렌즈의 먼지는 압축 공기를 사용하여 제거할 수 있다.

(2) 헤드(Head) 세척

외부는 부드러운 천으로 닦고, 내부는 필요 시 알코올 또는 물에 적신 면봉으로 닦을 수 있다.

(3) 핸들 세척

젖은 천으로 닦거나 소량의 알코올을 사용한다.

2) 보관방법

- (1) 기기를 장기간 염분 또는 고습환경에 방치하지 않는다.
- (2) 장기간 보관 시 손잡이에서 배터리를 분리한다.
- (3) 청결한 환경에서 보관하고, 상온에서 보관한다.
- (4) 작동조건
온도: 10°C ~ 40°C, 습도: 30% ~ 75%
- (4) 보관 및 운송조건
온도: -20°C ~ 60°C, 습도: 10% ~ 90%(without condensation)
- (5) 본 제품의 사용기한(수명)은 5년이다.

■ 사용시주의사항

가. 주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 렌즈 표면을 마모 및 흠집으로부터 보호한다.
- 3) 렌즈 표면에 직접 손을 대지 않는다.
- 4) 전구 교체 전 기기의 열을 식힌다.
- 5) 사용 중 온도는 60°C를 초과하지 않도록 해야 한다.

나. 경고

- 1) 본 제품을 물에 담그지 않는다.
- 2) 연마제 또는 기타 화학약품을 사용하지 않는다.
- 3) 손상된 상태에서는 사용하지 않는다.
- 4) 증기멸균(Autoclaving) 시도는 심각한 전기적 손상을 초래할 수 있다.
- 5) 초음파 세척은 권장하지 않는다.
- 6) 귀 손상 및 교차 오염을 일으킬 수 있으므로 일회용 팁(Ear Tip) 없이 검이경을 사용하지 않는다.
- 7) 환자간 교차 오염을 일으킬 수 있으므로 일회용 팁(Ear Tip)을 재사용하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)