

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신26-160호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2026년 1월 23일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)를 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하고 건조한 곳에 보관

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품 포장이 손상된 경우 사용하지 않는다.

나. 조작방법

- 1) 골반 밴드를 환자의 골반 아래로 밀어 넣어 골반 주위에 감는다. 본 제품을 적용하기 전에 환자의 두꺼운 옷은 제거하는 것을 권장한다.



- 2) 본 제품을 접거나 잘라, 치골결합 위쪽 중앙으로 15~20cm(6~8인치)정도 공간을 남긴다. (단일 밴드로 모든 체형에 사용 가능)



- 3) 본 제품 양측에 벨크로 도르래 시스템(Velcro Pulley System)을 적용한다.



4) 링을 천천히 당겨, 골반을 둘러싸듯이 양옆에서 동시에 압박을 생성한다.



5) 당김 링을 제품에 부착하여 고정(잠금)한다.



6) 제공된 공간에 날짜와 시간을 기록한다.



다. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 1) 일회용이므로 재사용하지 않는다.
- 2) 직사광선을 피하여 건조한 곳에 보관한다.

■ 사용시주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 의사의 처방 및 지도하에 사용하여야 한다. (단일 환자 사용)
- 2) 본 제품은 일회용이므로 재사용, 재가공 또는 멸균하지 않는다. 재사용 시 감염이나 심각한 부상의 위험이 발생할 수 있으며, 기기의 성능이 저하되거나 기능이 손실될 수 있다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)