

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 수신26-171호
- 품목명: 의약품압력주입기

작성연월 : 2026년 1월 23일

■ 사용목적

커프를 정맥 주사용 수액제 용기 주위에 감아 공기 압력을 줌으로써 주사액의 주입을 도와주는 기기

■ 보관 또는 저장방법

직사광선을 피하고 건조한 곳에 보관

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품을 사용하기 전에 손상 여부를 확인한다.

나. 사용방법

- 1) 커프를 수액 풀대에 건다.
- 2) 선택한 수액백을 커프 공간(캐비티)에 넣고, 플라스틱 후크를 사용하여 고정한다.
- 3) 흰색 레버를 튜브에 수직이 되도록 돌려 스톱콕을 닫고 공기를 주입한다.
- 4) 게이지가 원하는 압력을 표시할 때까지 공기주입기를 펌핑하여 공기를 주입한다.
- 5) 공기 주입을 시작할 때부터 커프의 압력을 모니터링하고, 필요한 경우 공기주입기를 펌핑하여 커프의 압력을 유지한다.
- 6) 커프의 압력을 해제하기 위해 트리거를 뒤로 당겨 공기 밸브를 열어준다.

7) 세척 지침

일반 세척 시 중성 세제 또는 희석된 표백 용액(1-2%)을 사용한다. 세척 용액으로 커프를 닦은 후 물로 헹구고 건조시킨다.

8) 소독 지침

① Enzol, Cidezime, Cidex, Sporicidin, isopropyl alcohol(70%) 또는 ethanol(70%) 등의 소독 용액을 사용한다. 커프를 닦거나 분무한 후 약 1분간 유지한다. 이후 물로 충분히 헹구고 건조시킨다.

② 렌즈 손상을 유발할 수 있는 용매로 게이지를 세척하지 않는다. 게이지는 중성 세제로만 세척한다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 1) 제품이 혈액이나 기타 체액으로 과도하게 오염된 경우에는 반드시 폐기해야 한다.

■ 사용시주의사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 잘못된 사용은 게이지의 정확도에 영향을 미칠 수 있으므로, 사용 전에 게이지 정확도를 확인한다.
- 3) 본 제품을 사용하는 동안 게이지 압력을 지속적으로 모니터링한다.
- 4) 400mmHg를 초과하여 가압하지 않는다.
- 5) 본 제품을 재가공 또는 멸균하지 않는다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)