

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 수신26-2105호
- 품목명: 구강개구기

작성연월 : 2026년 09월 17일

■ 사용목적

구강을 관찰 등 하기 위하여 벌어주는 기구

■ 보관 또는 저장방법

제품은 습하거나 햇빛이 강하지 않은 곳에 보관

■ 사용방법

1) 사용 전 주의사항

- (1) 제품의 소독, 청결 상태를 반드시 확인한다.
- (2) 제품의 사용설명서를 숙지하고 사용하도록 한다.
- (3) 숙련된 전문가의 판단에 따라 제품의 사용 용도에 맞게 사용한다.
- (4) 제품은 습하거나 햇빛이 강하지 않은 곳에 보관한다.

2) 조작방법

- (1) 환자를 눕힌 상태에서, 구강 기구를 환자의 상악 및 하악 절치(앞니) 사이 공간에 삽입합니다.
- (2) 구강 기구의 손잡이를 시계 방향으로 회전시킵니다.
- (3) 개구기(mouth opener)의 나사선 팁을 환자의 입 안으로 천천히 조여 넣습니다. 환자의 입이 벌어진 상태를 유지합니다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않고 폐기한다. (재사용 금지)

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품을 사용 목적 이외의 용도로 사용하지 않는다. 본 제품은 의식이 없거나 구강이 굳게 닫혀 구강의 개구가 필요 시에 사용한다.
- 2) 전문 의료 교육을 받은자의 지침에 따라 본 제품을 사용한다.
- 3) 환자를 주의 깊게 관찰하며 사용한다.
- 4) 제품이 오염되었거나 손상된 경우 사용하지 마십시오.
- 5) 사용 전 사용설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
- 6) 치아 및 구강 연조직 손상을 방지하기 위해 개구기 회전 시 부드럽게 조작하십시오.
- 7) 본 제품은 1회용이며, 사용 후 의료폐기물로 폐기하여야 합니다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)